

# NICTAVI Tarsus Patch

NICTAVI™ Tarsus Patch es un nuevo dispositivo médico diseñado para los pacientes con patologías oculares que requieren mantener los ojos cerrados. Es un método eficaz para mantener el párpado cerrado con el fin de preservar la superficie ocular. Su indicación principal se describió en el tratamiento de lagofthalmos tanto de niños como de adultos.<sup>1</sup>



NICTAVI se amolda al párpado superior apoyándose en el tarso y manteniendo el cierre adecuado del párpado. Se adapta perfectamente al párpado gracias a un adhesivo suave y flexible.

Descripción	NICTAVI Tarsus Patch
Referencia	NIC-STD-KIT-001
Presentación	1 caja / 15 unidades

1 Sara Geo et al. (2021) "Effectiveness of the Nictavi™ Tarsus Patch for managing lagophthalmos in children and adolescents".

2 Hearne et al. Journal of the Intensive Care Society 2018, Vol. 19(4) 345-350

## OTRAS APLICACIONES <sup>2</sup>

- Queratopatía por exposición
- Quemosis (edema conjuntival)
- Hiperlaxitud palpebral
- Disminución del reflejo del parpadeo

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Retirar la cobertura trasera siguiendo la dirección de las flechas.
2. La piel del párpado superior debe estar limpia y seca.
3. Colocar el parche NICTAVI sobre el párpado superior debidamente cerrado y centrado. Frotar suavemente para que se adhiera al párpado adecuadamente.
4. Para retirarlo, deslizar los dedos sobre el borde lateral del parche y tirar hacia atrás suavemente.
5. Desechar el parche una vez retirado del párpado.

## MATERIAL

Plástico de poliolefina, poliéster, acrilato adhesivo diseñado para uso médico/quirúrgico, adhesivo de silicona suave de grado médico hipoalérgico.